

ACOS™

피부 봉합기와 제침기

Acos 피부 봉합기와 제침기가 보장하는
합리적 만족




큐메디케어
quality medical device



ACOS™

피부 봉합기와 제침기

Acos 피부 봉합기와 제침기가 보장하는 합리적 만족

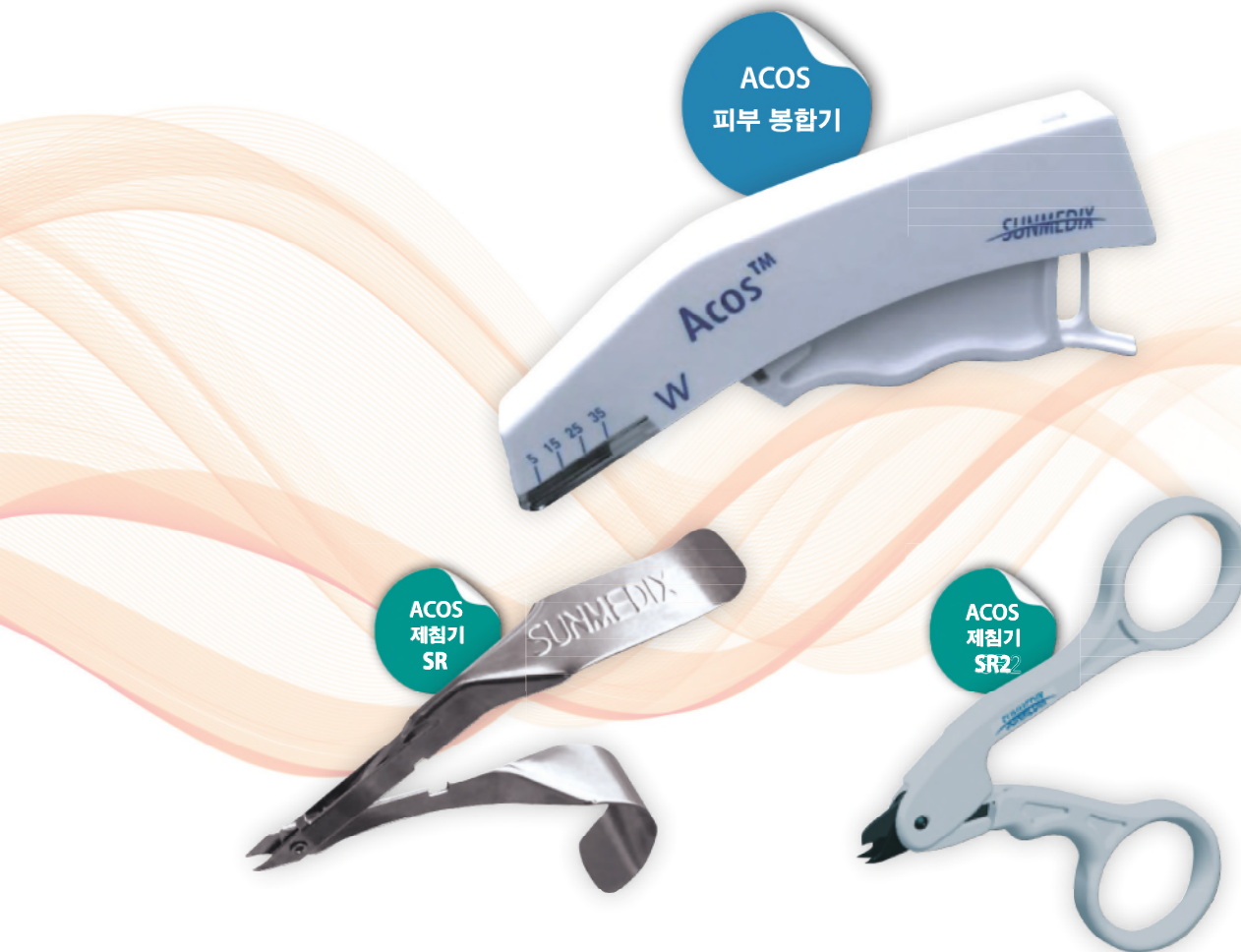

ACOS 피부 봉합기

○ Acos 피부 봉합기는 최상의 품질을 추구합니다

적은 힘으로 작동 가능하면서도 재밍과 공샷이 최소화 될 수 있도록 하였습니다.

Acos 피부 봉합기는 일반 외과, 정형 외과, 산부인과 등 피부 봉합이 필요한 모든 과에 폭넓게 적용됩니다.

ACOS 제침기

○ Acos 제침기를 공급함에 있어서 사용자 편의에 최선을 다하였습니다.

일반 외과 기구에 범용적으로 사용되는 재질 (STS 304)을 적용하였습니다.

적은 힘으로 작동할 수 있는 구조를 적용하였으며, 사용자 힘이 최소화될 수 있는 디자인을 이루었습니다.

또한 모든 크기의 staple에 적용할 수 있습니다.

특징

ACOS : 합리적 사용자의 선택

ACOS 피부 봉합기

독특한 내부 구조

독특한 내부 구조는 재밍을 방지합니다

사용자 편의성

사용자 친화적 디자인

간편한 점검

스테플 잔량의 쉬운 확인

용이한 시야 확보

시술 부위 시야 확보 용이

ACOS ▶ SKIN STAPLER

일회용 피부 봉합기

재질 : 의료용 재질

멸균 : ETO

인증 : 국내 GMP 및 해외 CE

포장 : 타이벡 및 트레이를 사용한 개별 포장

ACOS 제침기

재질

100% 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 & 플라스틱

사용 편의성

최소의 힘으로 제침 가능

인체 공학적 디자인

조작이 편한 디자인

용이한 시야 확보

시술 부위 시야 확보 용이

ACOS ▶ STAPLE REMOVER


일회용 제침기

재질 : 의료용 스테인레스 스틸 (STS 304), 플라스틱

멸균 : ETO


인증 : 국내 GMP 및 해외 CE

포장 : 타이벡 파우치를 사용한 개별 포장

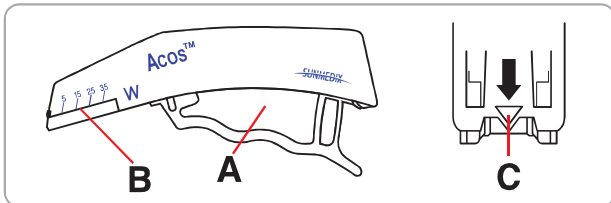


Acos™ 피부봉합기의 개략도 및 명칭

- A. 손잡이
- B. 잔량 스테플 수
- C. 스테플 중심 표시화살표

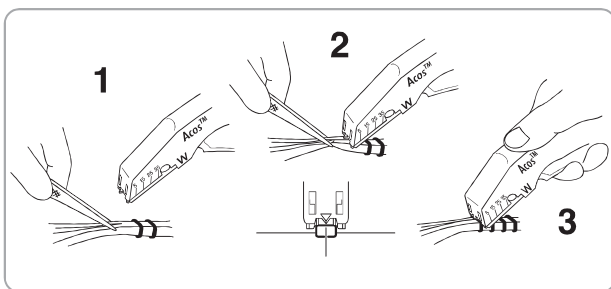


사용 방법

1. 피부 봉합을 하기 위해 치상검자 또는 피부를 잡을 수 기구를 이용해 피부 절개면이 일치 되도록 잡는다.
2. 피부 봉합기의 정면에 있는 중심 표시 마크를 절개된 두 피부 단면의 중앙에 위치 시킨다.
3. 핸들을 완전히 당긴 후 놓는다. 핸들을 완전히 당기지 않을 경우 스테플의 미성형 또는 봉합 불충분이 발생 할 수 있다. 이러한 방법으로 시술부위를 일정한 간격으로 봉합한다. 만약 미성형이 발생할 경우 미성형 된 스테플을 제거하고 새로 시술하여야 한다.

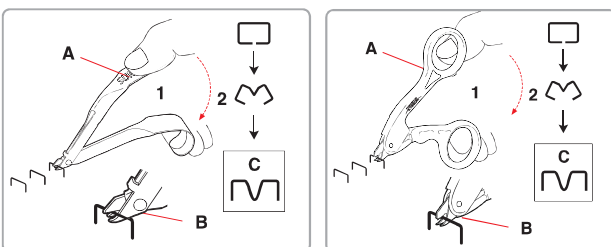


Acos™-SR(SR2)을 이용한 스테플 제거

1. 시술된 스테플과 피부 사이로 제거기의 아래 받침대를 위치시킨다.
 2. 핸들을 완전히 누른 후 스테플 제거기를 위로 들어 올려 스테플을 제거한다.
- A. 핸들
 - B. 아래받침대
 - C. 제거된 스테플

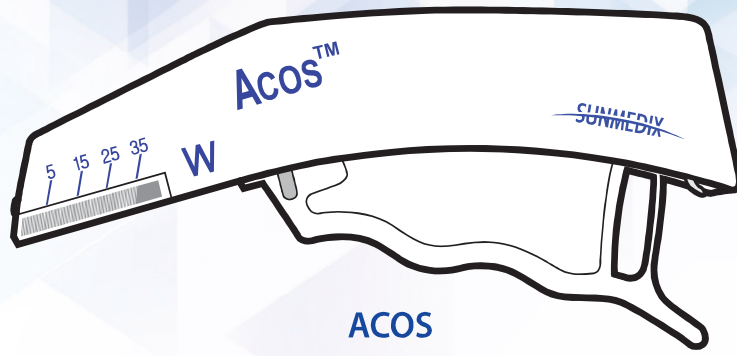

ACOS
피부 봉합기
 10ea/box

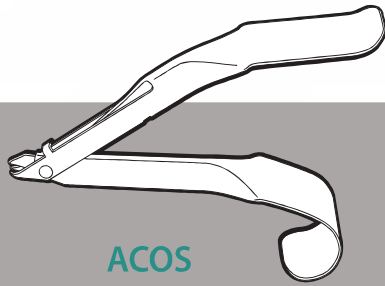

ACOS
제침기 SR
 20ea/box



ACOS
제침기 SR2
 50ea/box

봉합침의 규격

Type	Span (mm)	Height (mm)	Wire Diameter	Remark
Wide	6.4	4.0	0.57	
Regular	5.6	3.8	0.57	

주문 정보

Ref No.	Name	Description	Carton Q'ty	Remark
0402A35W	Acos 35W	Acos disposable skin stapler, 35 wide staples	100 ea	10 box/carton
0402A25W	Acos 25W	Acos disposable skin stapler, 25 wide staples	100 ea	10 box/carton
0402A35R	Acos 35R	Acos disposable skin stapler, 35 regular staples	100 ea	10 box/carton
0402A25R	Acos 25R	Acos disposable skin stapler, 25 regular staples	100 ea	10 box/carton
0402ASR	Acos SR	Acos disposable staple remover	200 ea	10 box/carton
0402ASR 2	Acos SR 2	Acos disposable staple remover	500 ea	10 box/carton

판매원 : 큐메디케어

서울특별시 강서구 방화대로6다길 41

T. 02-6494-0646 F. 02-6004-6219

제조원 : (주)선메딕스

경기도 남양주시 진접읍 금강로 1845번길 78-21

T. 031-574-7417 F. 031-574-1599 www.sunmedix.com

 **큐메디케어**
 quality medical device